

Hautkleber & Gebrauchshinweise

Hinweise:

B-400 / B-460 / B-530 und BT-460 sind auf Silikon basierende medizinische Hautkleber in Ethylacetat. Bei Hautkontakt können in seltenen Fällen Irritationen auftreten.

Um sicher zu stellen, welcher Kleber für Sie und Ihre Epithese geeignet ist, kontaktieren Sie vor der ersten Anwendung Ihren Arzt und/oder Epithetiker.

Verschließen Sie den Hautkleber nach jeder Anwendung sorgfältig und bewahren Sie ihn an einemkühlen und trockenen Ort auf.

Inhalationen und Augenkontakt vermeiden. Nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten.

Für Schäden, die auf eine Fehlanwendung der von uns vertriebenen Produkte zurückzuführen ist, übernehmen wir keine Haftung, Garantie- oder Ersatzleistung.

Unser komplettes Sortiment und aktuelle Preise finden Sie unter www.cosmesil.de

Die richtige Anwendung in sieben Schritten:

- 1. Entfettung von Haut und Epithese
- 2. Aufbringung von G609
- 3. G609 vorbereiten zur Klebung
- 4. G609 mit G608 entfernen
- 5. Silikonkleber B-400 / B-460 / B-530 / BT-460
- 6. Aufbringung von Hautklebern auf Silikonbasis
- 7. Entfernung von Hautklebern auf Silikonbasis

1. Entfettung von Haut und Epithese

Fette auf Haut oder Epithese können zu einem Verlust der Klebekraft führen.

Zur Vorbereitung jeder Klebung müssen Haut und Epithese daher absolut fettfrei sein. Wir empfehlen hierzu die Anwendung von G608.

Reinigen Sie Ihre Haut anschließend mit Wasser und Seifenlauge und trocknen Sie die zu klebenden Bereiche sowie die Epithese gründlich ab.



2. Aufbringung von G609

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur Aufbringung des G609 Klebers empfehlen wir Watteträger (Wattestäbchen).

Den Watteträger in den Kleber eintauchen und eine dünne Schicht gleichmäßig auf der Unterseite der Epithese aufbringen. Eine zweite Klebeschicht kann nach Trocknung* (*siehe 3.) ggf. zur Sicherheit aufgebracht werden.



3. G609 vorbereiten zur Klebung

Die Klebewirkung des Hautklebers G609 entsteht erst nach Trocknung der Klebeschicht, bzw. durch die Einwirkung von Hitze. Verwenden Sie einen Fön, um den Kleber gleichmäßig zu erwärmen.

Die ideale Klebewirkung ist erreicht, wenn die geklebte Schicht komplett transparent ist. Bringen Sie die Epithese an der gewünschten Stelle an. Drücken Sie die Epithese fest auf die Haut.



4. G609 mit Entferner G608 entfernen

Die Epithese an der dicksten Stelle anfassen und vorhandene Klebereste von der Epithese vorsichtig mit G608 und Textiltuch oder Kompresse entfernen.



Silikonkleber B-400 / B-460 / B-530 / BT-460

B-400 / B-460 / B-530 / BT-460 sind PSA-Kleber (Pressure Sensitive Adhesive = Kontaktkleber) und lassen sich nach Anbringung nicht mehr korrigieren. Daher empfiehlt es sich, die Epithese vorerst ohne Kleber zu platzieren (Trockenübung), um die richtige Position festzulegen. Benutzen Sie den Hautkleber erst, wenn Sie sicher sind, wie die Epithese zu platzieren ist.



Der Hautkleber darf niemals direkt auf die Haut, sondern nur auf die Epithese aufgetragen werden.





6. Aufbringung von Hautklebern auf Silikonbasis

Zum Auftragen von B-400 / B-460 / B-530 und BT-460 können Sie den im Lieferumfang enthaltenden Pinsel benutzen.

Streifen Sie überflüssigen Kleber am Rand der Dose ab. Tragen Sie nun den Hautkleber gleichmäßig in einer dünnen Schicht auf die Epithese auf.

Lassen Sie den Kleber auf der Epithese ca. 2-3 Minuten antrocknen. Platzieren Sie die Epithese anschließend mit etwas Druck an der gewünschten Stelle.



7. Entfernung von Hautklebern auf Silikonbasis

Es ist wichtig, die Epithese nach jeder Klebung sorgfältig mit G608 zu säubern.

Zur Entfernung halten Sie die Epithese an der dicksten Stelle und entfernen die vorhandenen Klebereste am besten mit einem Textiltuch.

Die Ränder der Epithese können sich dabei leicht abrollen, stellen sich aber nach 5-10 Minuten wieder in Position.

G608 eignet sich ebenfalls hervorragend zur Entfernung von Kleberesten auf der Haut.



B-530 (silikonbasiert)

Farbe: transparent Konsistenz: dünnflüssig

Inhalt: 1 oz.



B-400 (silikonbasiert)

Farbe: transparent

Konsistenz: dünnflüssig

Inhalt: 1 oz.



B-460 (silikonbasiert)

Farbe: transparent

Konsistenz: etwas dickflüssiger als B-400

Inhalt: 1 oz.



BT-460 (silikonbasiert)

Farbe: transparent

Konsistenz: sehr dickflüssig

Inhalt: 2 oz.



G-609

Farbe: weiß

Konsistenz: dickflüssig

Inhalt: 35 ml



G608 Entferner

Farbe: transparent

Konsistenz: ölige Konsistenz

Inhalt: 100ml

Hinweise: hautfreundlich, Anwendung für alle

Hautkleber



G604 Rand-Adhesive

Farbe: transparent Konsistenz: gelartig Inhalt: 5g / 25g

Hinweise: unauffällige Übergänge, keine Haltefunktion, nur Adaption der Ränder bei implantatgetragenen Epithesen, abwaschbar mit Wasser



E-Box

Außenmaß: 11,5 x 8,5 x 4,5mm

Praktische Aufbewahrungsbox für Epithesen. Der integrierte Spiegel vereinfacht das Einsetzen der Epithese.



Sterile Watteträger extra dünn - 100 St/Pckg.

Die Watteträger eignen sich hervorragend zur Pflege aller Bereichen extraoraler Implantate (Stegoder Magnet-Attachments).

Der Wattekopf ist mit einem Durchmesser von nur 2 mm wesentlich feiner als ein herkömmlicher Watteträger und ermöglicht eine effektivere Reinigung.

Das Stäbchen des Trägers besteht aus leichtem Aluminium und liegt bei der täglichen Pflege gut in der Hand. Die Watteträger sind steril und einzeln verpackt.



Vertrieb durch:

cosmesil.de

Mittermaierstr. 25 69115 Heidelberg

www.cosmesil.de

Tel: 06221 - 431 99 22



Technovent Ltd.

5 York Park | Bridgend CF31 3TB | UK

Für Sie mit den besten Empfehlungen von:

Juni 2020